

6. Čištění - Sterilizace - Skladování



Dekontaminace: Ponořte nástroje do dezinfekčního roztoku ihned po použití.

Nenechte nástroje uschnout.

Čištění a dezinfekce: Rozeberte všechny nástroje, které mají být rozebrané (momentový klíč).

Seskupte spolu všechny komponenty dle jejich konstitutivních materiálů, aby se předešlo korozi a elektrolýze.

Ponořte komponenty do příslušného dezinfekčního prostředku. Produkty s vysokým podílem chloru nebo obsahující kyselinu šťavelovou nejsou vhodné k dezinfekci nástrojů z nerezavějící oceli (riziko koroze).

Zásadité produkty s pH vyšším než 9 nejsou vhodné pro dezinfekci nástrojů z hliníku (riziko poškození povrchu). **Ideální pH je 5 - 9.**

Všechny nástroje mohou být čištěny manuálně i mechanicky (ultrazvukem).

Dbejte na úplné vysušení komponentů s čistým stlačeným vzduchem.

Kontrola: Monitorujte čistotu a správné fungování nástrojů a komponentů. Smontujte všechny komponenty, které byly rozebrané. Opatřované nebo poškozené nástroje vyměňte. Pro zachování optimálního výkonu by rotační nástroje neměly být použité více než 10krát.

Balení: Nástroje mohou být individuálně zabalené do sterilních obalů nebo uloženy na příslušné místo do chirurgické kazety a následně zabalené do sterilního obalu před sterilizací.

Sterilizace: Chemická sterilizace a sterilizace horkým vzduchem nejsou vhodné. U všech materiálů souvisejících s implantáty je nutná sterilizace nasycenou párou a to dle následujících parametrů.

134°C po dobu 18 minut. Doporučený čas sušení je 20 - 60 minut.


Doba trvání sterility u komponentů sterilizovaných v ordinaci/laboratoři závisí od mnoha faktorů, jako jsou např. balení, podmínky uskladnění apod. Postupujte dle standardních metod ordinace/laboratoře.

Doba trvání sterility komponentů, které jsou sterilizované výrobcem je vyznačena na obalu. (viz. Příloha 2). Nepoužívejte produkty, kterým vypršela doba expirace !


Uskladnění: Obaly uchovávejte na čistém a suchém místě a neskladujte po dobu delší než je uvedena na obalu.

Dodatek 2 - Vysvětlení štítků

Štítek u implantátu

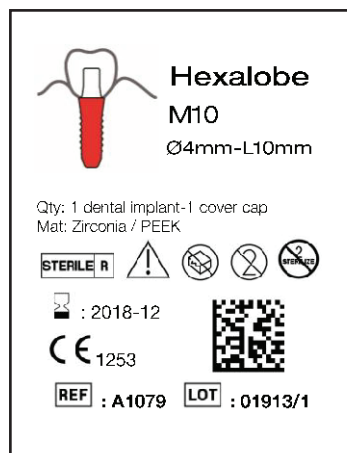

Štítek na nástrojích

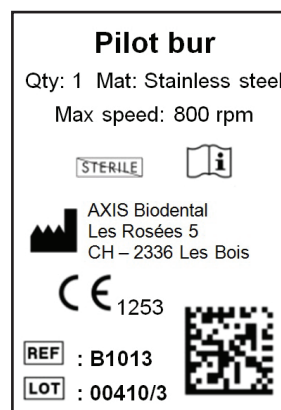

Vysvětlení symbolů

CE značení	
Výrobce	
Datum expirace	
Číslo šarže	
Reference	
Nesterilní	
Sterilní (Gamma paprsky)	
Upozornění - Přečtěte si Instrukce k použití	
Pro více informací si přečtěte Instrukce k použití	
Na jedno použití	
Na jedno použití	
Nepoužívejte pokud je obal poškozen	
Neskladujte na přímém slunci	
Maximální otáčky (po směru nebo proti směru hodin. ručiček)	
Maximální krouticí moment (výhradně po směru hodinových ručiček)	